

Selecta

A LEGÍTIMA

CINTA ABDOMINAL
PARA HOMENS
E MULHERES



Selecta Industrial e Distribuidora de Artigos Médicos e Hospitalares Ltda.
CNPJ: 06.374.891/0001-22

Rod. Prefeito Aristeu Vieira Vilela - Km 182,688 - S/Nº - Vila São José
Guaratinguetá/SP | CEP 12522-010 | Fone/Fax: (12) 3133-8090
Responsável Técnico: Mariana G. S. Carvalho Ferreira - CRF/SP 61109
Autorização de Funcionamento 8.04060.9 | www.meiaselecta.com.br |
Cadastro ANVISA: 80406090014



FABRICADO NO
BRASIL



sac@meiaselecta.com.br
0800 770-1113

Selecta

A LEGÍTIMA

INDICAÇÕES:

- Pós-operatório de cirurgias abdominais, de obesidade, plásticas e cirurgias torácicas proporcionando maior conforto e segurança.
- Como medida profilática contra hérnias incisionais.
- Prevenção e alívio de dores lombares e tronco.
- Contusões na coluna e torác.

MODO DE USAR:

- Colocar a parte elástica da cinta nas costas (parte mais larga para cima) ajustando-a acima da cintura.
- Envolver o tronco com a parte esquerda da cinta, mantendo-a esticada e bem junto ao corpo.
- Em seguida, envolver o tronco com a parte direita da cinta, fixando-a com o velcro, ajustando a compressão.

PRECAUÇÕES:

- Após o uso, deixe secar à sombra.
- Não recomendada para redução de peso ou gorduras localizadas.
- Após o início do uso, não guardar em embalagens plásticas.

CONTRA-INDICAÇÕES:

- Infecção na pele.

CONSERVAÇÃO:

- A lavagem deve ser apenas manual, na temperatura máxima de 40°C.
- Lave sempre com sabão neutro. Evite detergentes e amaciantes.
- Não alvejar. Enxaguar diversas vezes com água morna.
- Não esfregar e torcer, espremer como tricô de lã.
- Não é recomendado o uso de secadora.
- A secagem deve ser por gotejamento.
- Secar à sombra em lugares arejados ou sobre uma toalha enxuta.
- Não passar.
- Limpeza a seco profissional, processo suave.



Selecta

A LEGÍTIMA

CARACTERÍSTICAS:

A Cinta Abdominal Selecta, frequentemente utilizada na prevenção e alívio das dores lombares e no tronco.

- Anatômica, mantém a liberdade dos movimentos.
- Com cinta ajustável.
- Em 3 alturas (15cm, 20cm e 25cm).
- Em 5 tamanhos
(P-90cm, M-1,00m, G-1,10m, GG-1,20m e U-1,60m).
- Toque agradável na parte interna, é resistente e não enruqa nem escorrega enquanto usada.

Modelos	Tamanhos
2001 (15 cm)	P - 0,90 m
2002 (20 cm)	M - 1,00 m
	G - 1,10 m
2003 (25 cm)	GG - 1,20 m
2004 (25 cm)	Único - 1,60 m

COMPOSIÇÃO:

68 % Poliéster
30 % EVA
2 % Elastano

VALIDADE:

Indeterminada

