

DYNAMIC

Selecta

A LEGÍTIMA

BRAÇADEIRA TERAPÊUTICA
DE COMPRESSÃO
DYNAMIC

20-30 mmHg
30-40 mmHg

**INSTRUÇÕES
DE USO**

www.meiaselecta.com.br



A member of the
Juzo Group

PREZADO CLIENTE, VOCÊ ESCOLHEU UM PRODUTO EM QUE PODE CONFIAR. O ALTO NÍVEL DE CONHECIMENTO TÉCNICO DE NOSSOS FUNCIONÁRIOS É SUA GARANTIA, POIS A EXCELENTE QUALIDADE SEMPRE FOI UMA TRADIÇÃO NA SELECTA.

RECOMENDAÇÃO DE USO

- Peça no seu ponto de venda que lhe explique ou demonstre como vestir.
- Vista a braçadeira de preferência logo pela manhã.
- Tenha cuidado com as unhas das mãos (falhas, compridas, etc.), bem como com os anéis e pulseiras, pois, podem danificar a malha. O ideal é vestir luvas de borracha (por exemplo, as de lavar louça) ou luvas especiais, uma vez que elas evitam que se puxem fios.

PRECAUÇÕES

- Use as braçadeiras de compressão somente por prescrição médica.
- À medida que o tratamento progrida ou novos sintomas apareçam, será necessário tirar novas medidas e, possivelmente, adquirir uma nova braçadeira de compressão.
- Embora sua braçadeira de compressão seja resistente a óleos, pomadas, transpiração da pele e ao calor é recomendável ter sua braçadeira verificada regularmente por seu médico especialista. Pois a combinação de alguns fatores externos poderá prejudicar a durabilidade da malha.
- Se sua braçadeira de compressão Selecta tiver uma borda de silicone, certifique-se de que a área de contato com a pele para essa borda esteja livre de óleo, pó, cremes e pomadas.
- Se sua braçadeira ficar danificada, consulte o seu revendedor especializado. Não tente consertá-la, pois isso pode prejudicar a qualidade e eficácia.
- Por razões higiênicas, recomendamos não utilizar este produto em mais de uma pessoa.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO

Antes da lavagem feche os fechos (caso existam). Recomendamos que a braçadeira com borda de silicone seja virada do avesso antes da lavagem.

A primeira lavagem da braçadeira deve ser feita separada de outras peças de roupa (existe o risco de soltar tinta). Se possível, lave a braçadeira diariamente na máquina, no ciclo de roupas delicadas (40 °C).

Dica: proteja o tecido lavando a braçadeira em um saco de rede. Não é recomendado o uso de amaciante. Se for lavada à mão, enxaguar abundantemente e não torcer. Você pode reduzir o tempo de secagem colocando a braçadeira de compressão lavada em uma toalha grossa, enrolando bem a toalha, e pressionando firmemente para retirar o excesso de umidade. Pendure a braçadeira esticada. Não deixe a braçadeira secar na toalha ou no sol.

Se secar à máquina, use o ciclo delicado. Não lavar à seco. Consulte os símbolos de lavagem na etiqueta de sua braçadeira de compressão Selecta.



COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

73-75 % Poliamida

20-22 % Elastano

5-6 % Silicone

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Sempre guarde sua braçadeira na temperatura entre 15 °C a 30 °C, protegida da incidência direta dos raios solares.
- As braçadeiras terapêuticas de compressão Selecta têm um período máximo de validade de 5 anos contados da data de fabricação. Esse período inclui um tempo máximo de utilização de 6 meses contados da data de compra.
- Devido ao desgaste normal e ao afrouxamento do material, a eficácia dos nossos produtos só pode ser garantida por um período máximo de 6 meses, desde que tenham sido manuseados corretamente (por exemplo: durante a lavagem, ao colocá-los e tirá-los).

INDICAÇÕES

Compressão 20 – 30 mmHg

- Linfedema
- Congestões venosas
- Edema pós-traumático
- Tratamento de queimaduras e cicatrizes

Compressão 30 – 40 mmHg

- Linfedema
- Congestões venosas
- Edema pós-traumático

CONTRAINDICAÇÕES

- Insuficiência arterial
- Se houver feridas abertas na região tratada, essas feridas devem ser cobertas com um curativo adequado ou bandagem antes de vestir a braçadeira
- A Selecta não assume qualquer responsabilidade pelo uso indevido do presente produto nos casos acima contraindicados

EFEITOS ADVERSOS

- Uma utilização correta deste produto não apresenta quaisquer efeitos colaterais.
- Contudo, em qualquer dos casos, como por exemplo, irritação da pele, agravamento dos sintomas, etc., consulte o seu médico/fisioterapeuta ou o local onde adquiriu o produto.
- Caso haja conhecimento de incompatibilidade com um ou vários componentes deste produto, deverá contatar o seu médico antes de usar o produto.
- O fabricante não se responsabiliza por danos/ferimentos causados pelo manuseio inadequado ou o uso desapropriado do produto.

Selecta Dynamic Braçadeiras Terapêuticas de Compressão

c circunferência em cm P altura/comprimento em cm		Tabela de medidas					
		PP	P	M	G	GG	XG
CG, CH, AGA	cG 41,0-47,0	24,0-26,0	26,0-28,5	28,0-30,5	30,0-33,0	32,0-35,0	34,0-37,0
PCG	max	30,0-33,0	32,0-35,0	34,0-37,0	36,0-39,5	38,0-41,5	40,0-44,0
CF	cF 21,0-25,0	23,0-25,0	24,5-27,0	26,0-28,5	27,5-30,0	29,0-31,5	30,5-33,5
PCE	max	28,0-30,5	30,0-33,0	32,0-35,0	34,0-37,0	36,0-39,5	38,0-41,5
CE	cE 21,0-25,0	23,0-25,0	24,5-27,0	26,0-28,5	27,5-30,0	29,0-31,5	30,5-33,5
max		25,0-27,5	27,0-29,5	29,0-31,5	30,5-33,5	32,0-35,0	33,5-36,5
CD	cD 7,5	23,0-25,0	24,5-27,0	26,0-28,5	27,5-30,0	29,0-31,5	30,5-33,5
max		25,0-27,5	27,0-29,5	29,0-31,5	30,5-33,5	32,0-35,0	33,5-36,5
CC		14,5-16,0	16,0-17,5	17,5-19,0	19,0-20,5	20,5-22,0	22,0-24,0
CA		17,5-19,0	19,0-20,5	20,5-22,0	22,0-23,5	23,5-25,0	25,0-26,5



CG



CH



AGA

COMO VESTIR A BRAÇADEIRA



Puxe a metade superior da braçadeira sobre a metade inferior.




Puxe a braçadeira pela dobra, fazendo-a passar pela mão e braço, até a dobra chegar no cotovelo.



Desdobre a parte correspondente ao braço na região do cotovelo e puxe gradualmente em direção ao ombro.



Modele a braçadeira de modo que não haja pregas e a acomode bem ao longo de todo o braço. Considera-se que a braçadeira está bem colocada quando não há nenhuma prega no tecido e ela não impeça a liberdade dos movimentos.

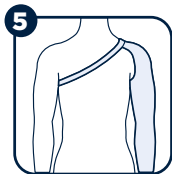

Braçadeira com liga de fixação ou alça de sutileira

Puxe uma alça no peito e a outra em suas costas unindo as extremidades. Nota: Se a alça do ombro estiver muito solta ou muito apertada, você pode ajustar o comprimento usando a fivela de ajuste.

Selecta

A LEGÍTIMA

Selecta Industrial e Distribuidora de Artigos Médicos e Hospitalares Ltda.

CNPJ: 06.374.891/0001-22

Rod. Prefeito Aristeu Vieira Vilela - Km 182,688 - S/Nº - Vila São José
Guaratinguetá/SP | CEP 12522-010 | Fone/Fax: (12) 3133-8090
Responsável Técnico: Mariana G. S. Carvalho Ferreira - CRF/SP 61109
Autorização de Funcionamento 8.04060.9 | www.meiasselecta.com.br
Cadastros Anvisa Braçadeira Dynamic: 80406090016




sac@meiasselecta.com.br
0800 770-1113

Material passível de erros
BR 11/2020